

# Gebruiksaanwijzing SOA combinatietest vrouw


Je ontvangt een setje met een reageerbuisje. De bedoeling is dat alle kweekstokjes en/of de urine in hetzelfde buisje geplaatst worden.

De Chlamydia en Chlamydia/Gonorrhoe combitest voor vrouwen bestaat uit een Hologid APTIMA kit met:

- Drie witte wattenstokjes (voor vagina, anus en eventueel keel)
- Een wit buisje zonder venster en gevuld met transportvloeistof
- Een aanvraagformulier
- Een blauwe transport envelop met RidgidSafetyBag
- Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport

Gebruiksaanwijzing kweekafname:

- Mond: Neem met 1 wattenstokje mondslim af van de amandel helemaal achterin en doe het staafje in het buisje en breek hem af.
- Vagina: Breng het wattenstokje in de vagina, draai het wattenstokje rond in de vagina. Doe het staafje in het buisje en breek hem af.
- Anus: Breng 1 wattenstokje rectaal in en doe daarna het staafje in het buisje, en breek hem af.

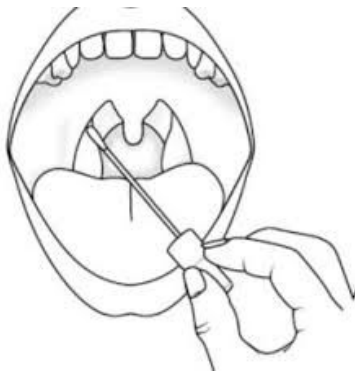

- Er is reeds een QR-code sticker op het buisje en je aanvraagformulier geplakt.
- Sluit het buisje met de 2-3 stokjes erin en stuur het pakketje per post naar het laboratorium.
- **STUUR OOK HET AANVRAAGFORMULIER MEE NAAR HET LAB!**
- Na 4-5 werkdagen is je uitslag in te zien op de website [soastudentarts.nl](https://soastudentarts.nl). Typ bij "uitslag" je cliëntnummer in en je krijgt dan direct anoniem de uitslag.

## Contact

E-mail: [info@soastudentarts.nl](mailto:info@soastudentarts.nl)

Tel: +31 (0) 50 211 0 911