

Gebruiksaanwijzing SOA-combinatietest vrouw

Je ontvangt een test-set met een reageerbuisje. Je mag zelf kiezen welke lichaamsgebieden (vagina, anus en mond) je mee wilt nemen in de test. **Zorg ervoor dat alle gebruikte wattenstaafjes uiteindelijk in hetzelfde buisje geplaatst worden.**

De chlamydia en chlamydia/gonorroecombitest voor vrouwen bestaat uit een Hologic Aptima kit met:

- Een reageerbuisje waar transportvloeistof in zit
- Drie wattenstaafjes (voor vagina, anus en mond)
- Een aanvraagformulier
- Een blauwe transportenvelop met RigidSafetyBag
- Een gebruiksaanwijzing voor afname en transport

Gebruiksaanwijzing kweekafname:

- Vagina: plaats een wattenstaafje in de vagina en draai deze even rond in de vagina. Plaats het wattenstaafje vervolgens in het reageerbuisje, zonder andere oppervlakken te raken, en breek hem af.
- Anus: breng een wattenstaafje rectaal in en doe daarna het staafje in het reageerbuisje, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.
- Mond: neem met een wattenstaafje mondslim af van de amandel helemaal achterin de mond en doe het staafje in het reageerbuisje, zonder andere oppervlakken aan te raken, en breek hem af.



- Sluit het reageerbuisje inclusief de afgebroken wattenstaafjes. Plaats het buisje vervolgens volgens de instructies in de RigidSafetyBag.
- Stop de RigidSafetyBag in de blauwe retourenvelop.
- **BELANGRIJK: STOP OOK HET AANVRAAGFORMULIER IN DE BLAUWE RETOURENVELOP!**
- Verstuur de blauwe retourenvelop (dus inclusief aanvraagformulier en RigidSafetyBag met buisje) via de post naar het laboratorium.
- Na 3-4 werkdagen is je uitslag in te zien op de website SoaStudentArts.nl. Typ bij 'uitslag' je cliëntnummer in en je krijgt dan direct anoniem de uitslag.

Contact

E-mail: info@soastudentarts.nl

Tel: +31 (0) 50 211 0 911